



1

LIFT HOLEN

Per Knopfdruck holen Sie den Lift in das Stockwerk, in dem Sie sich gerade befinden. Die Sicherheitsschranken und die seitlichen Bodenklappen öffnen sich automatisch.



2

AUFFAHREN

Fahren Sie mit dem Rollstuhl auf die Plattform.



3

SICHERE FAHRT

Legen Sie Ihren Finger auf die Sensortaste. Damit schließen sich die Sicherheitsschranken sowie die seitlichen Bodenklappen automatisch. Der Lift setzt sich sanft in Bewegung.



4

VERLASSEN

Wenn Sie am Ziel angekommen sind, öffnen sich die Sicherheitsschranken und seitlichen Bodenklappen automatisch. Jetzt können Sie den Lift verlassen.

Auf Wunsch können Sie den Lift mit Hilfe der Fernbedienung in die platzsparende Parkposition hochklappen. Die Treppe ist wieder frei benutzbar.